


## Samen gaat het makkelijk!

Met **MUPPY®** de correctiehulp (MVP) wordt het voor uw kind makkelijk om spelenderwijs het schadelijke duimen op duimen, vingers, bedpuntjes en dergelijke af te leren! De "gebruiksaanwijzing" moet echter exact worden aangehouden. Want het is zelfs mogelijk om een reeds ontstane open beet te corrigeren.

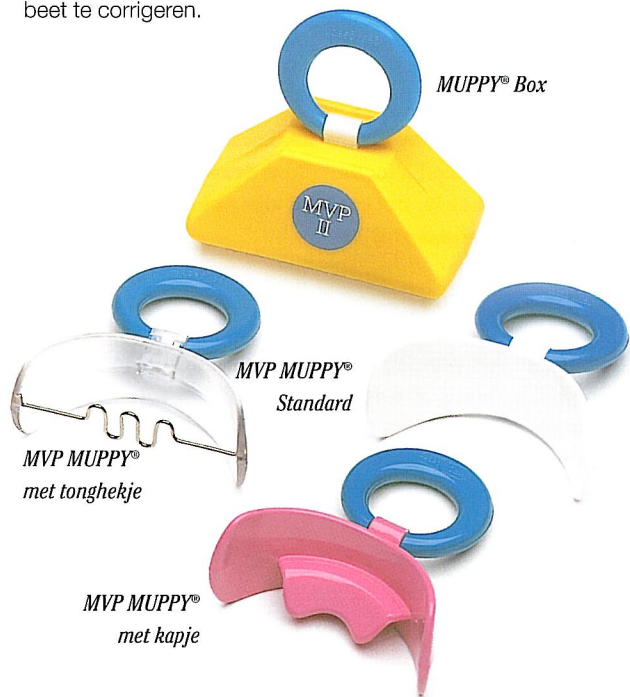

**MUPPY® Box**

**MVP MUPPY® Standard**

**MVP MUPPY® met tonghekje**

**MVP MUPPY® met kapje**

Voor alle reeds voorhanden verkeerde posities van de tanden of voor spraakstoornissen is er een eigen **MUPPY®**. Welke voor uw kind juist is, beslist uw tandarts of kaakorthopeed. Hij zal u ook adviseren of (en wanneer) er na het afleren van het duimen nog een "echte" vroegtijdige behandeling van kaakorthopedische afwijkingen moet volgen.

**Merk: MVP-grootte II, wisselgebijt = blauwe ring**

## De 6 MUPPY®-regels

Ervaringen hebben aangetoond, dat kinderen in de schoolgaande leeftijd binnen een week het duimen kunnen afleren. Ook uw kind zal – met uw ondersteuning – de noodzaak hiervan inzien en dankbaar een beroep doen op uw liefdevolle hulp.

**1** **MUPPY®** is een vervanging voor spenen en dergelijke. De omwisseling moet vrijwillig en zonder dwang volgen.

**2** **MUPPY®** moet elke nacht worden gedragen.

**3** **MUPPY®** moet ook overdag regelmatig en urenlang (tijdens het maken van het huiswerk en tijdens het televisie kijken) in de mond zitten. Dat is belangrijk, want zo is niet alleen de omschakeling makkelijker, maar kan er ook sneller een verandering van de positie van de tanden worden bereikt.

**4** **MUPPY®** werkt gegarandeerd en het schadelijke duimen is – wanneer men zich aan regel 2 en regel 3 houdt – uiterlijk binnen een week voorbij. Om een "terugval" te voorkomen, is het na het afleren nodig om **MUPPY®** 's nachts nog vier tot zes weken door te dragen.

**5** Indien **MUPPY®** niet in de mond zit, dan hoort hij in de hygiënische opbergdoos.

**6** Niet vergeten: tanden én **MUPPY®** regelmatig poetsen!

**Overhandigd door:**

Praktijkstempel



# Afgelopen met het akelige duimen

**MUPPY® de correctiehulp\* helpt uw kind**

Patiënteninformatie (wisselgebijt)  
\* naar Prof. Hinz



# Schoolkinderen duimen toch zeker niet meer – of toch?

Helaas wel – en vaak "stiekem", omdat uw kind weet, dat het "veel te groot" is om nog te duimen! Blijft uw kind verder doorgaan met deze schadelijke gewoonte, dan heeft dit niet alleen zichtbare gevolgen voor de melktanden, maar ook voor de positie van de blijvende tanden.

Want speciaal tijdens het tanden wisselen, dus bij het doorbreken van de blijvende tanden, ontstaan er verkeerde posities.

Schadelijke duimgewoontes veroorzaken

- een open beet met
- omhoog gebogen tandenrij of
- leemtes tussen de voortanden of
- een voortandtrap met naar voren staande tanden.

En ze maken het neerslaan mogelijk

- van de tong en
- van de onderlip tussen de tandenrijen.

Afgezien van een verstoorde, esthetische indruk hebben deze verkeerde ontwikkelingen ook functionele gevolgen en gevolgen voor de gezondheid:

Uw kind kan niet goed bijten en kauwen; er ontstaan slik- en spraakgebreken – hij "slist" – en ademt door de mond in plaats van door de neus, wat onder andere tot frequente verkoudheden leidt.

Om te voorkomen, dat een verkeerde positie van de tanden niet verder verergert, moet elke duimgewoonte uiterlijk afgeleerd zijn voordat het kind naar school gaat.



## MUPPY® de correctiehulp

### De slimme vervanging voor schadelijke duimspenen

MUPPY® is voor uw kind de vervanging voor schadelijke duimspenen. Hij is in staat om reeds ontwikkelde anomale tandposities te stoppen en de kaakontwikkeling verder te normaliseren.

**Indien een omvangrijkere kaakorthopedische behandeling noodzakelijk is, dan dient deze pas te beginnen, wanneer zeker is, dat uw kind zijn duimgewoonte definitief heeft afgeleerd!**

MUPPY® de correctiehulp moet door uw kind 's nachts altijd en beslist ook overdag urenlang (bijv. tijdens het maken van het huiswerk en tijdens het televisie kijken) worden gedragen.



*Omhoog gebogen tandenrij van de bovenkaak met naar achteren verplaatste positie van de onderlaag door duimen.*

*Open beet door kalmeringspeen en neerslag van de tong tussen de tandenrijen.*

